

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

ANGIO-SET 	Descrição: Conector em Cloreto de Polivinila (PVC) atóxico, para acoplar aos equipamentos arteriais, e outras conexões. Possui conector fêmea, um conector macho rotatório e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 1200 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.
	Indicação: Para injeção de meios de contraste.
	Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.
	Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, para preencher o conector. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, na apresentação PVC, com conector fixo. Nos tamanhos de 25cm, 50cm, 75cm, 120cm.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010077.**

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

ANGIO-SET 	Descrição: Conector trançado em nylon e poliuretano, atóxico, utilizado para acoplar aos equipamentos de hemodinâmica, e outras conexões. Possui conector fêmea, conector macho rotatório e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 1200 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.
	Indicação: Para injeção de meios de contraste.
	Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.
	Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contra-indicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, para preencher o conector. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico na apresentação Trançado, com conector rotatório. Nos tamanhos de 50cm, 75cm, 120cm.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010077.**