


Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

TRANSFER-SET

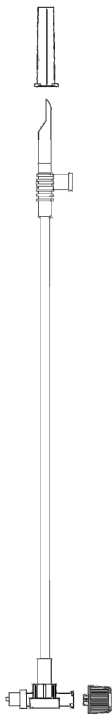

Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, em PVC atóxico flexível, DEHP *Free*, com válvula antirrefluxo em T, perfurador em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar a parte que contém o perfurador no frasco do meio de contraste e/ou soro fisiológico, a ser aspirado para a seringa, de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto, para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Não utilizar o produto, caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.


Precauções: Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações de PVC Liso com 1 via, perfurador com câmara gotejadora; e 1m de comprimento.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010077.**

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

TRANSFER-SET 3 VIAS

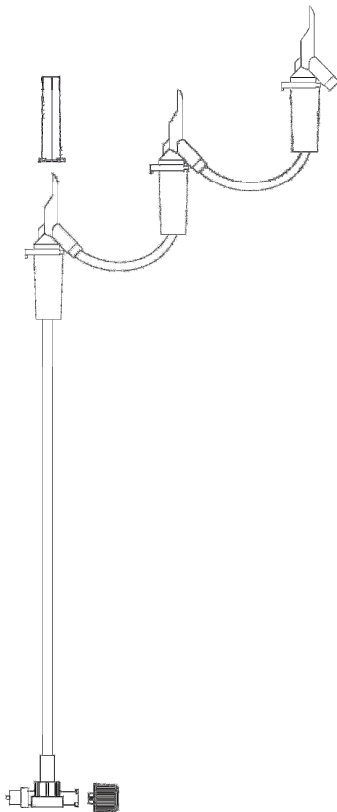

Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em PVC atóxico flexível, DEHP Free, com válvula antirrefluxo em T, perfurador em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Conectar a parte ou as partes que contém o perfurador no frasco do meio de contraste/soro fisiológico a ser aspirado para a seringa de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora. Todo este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações de PVC Liso com 3 vias com perfurador/spike grande e 1m de comprimento.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010077.**

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99