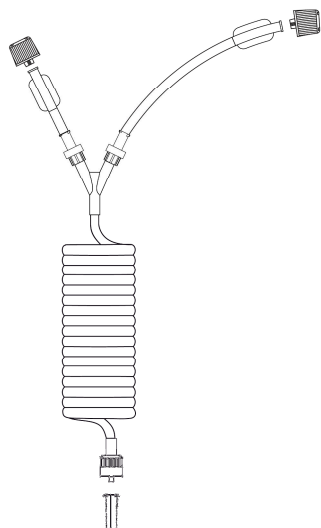


Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno

MR INJET-SET

Descrição: Conector em Y para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada em PVC atóxico flexível, DEHP Free. Possui conectores fêmea, com duas válvulas, e macho reversível; tampas protetoras das conexões em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 300 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar o conector fêmea na seringa da injetora e o macho conectar-se-a ao acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas, cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas, para preenchimento do conector. Não utilizar o produto, caso a embalagem esteja danificada. Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar o uso.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilizar após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, na apresentação 180cm, com duas válvulas.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010077.**