


Produto de Uso Único – Esterilizada por Óxido de Etileno

### MODELO 400106

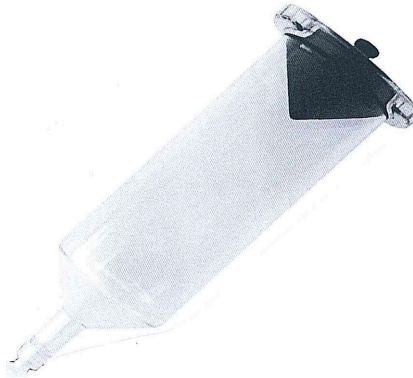

**Material:** SERINGA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE SHENZHEN

**Descrição:** Seringa de 200mL em PVC atóxico, e livre de látex. Composto pelos acessórios: tubo em J de enchimento rápido. Produto estéril e apirógeno.

**Indicação:** Compatível com injetoras de contraste: Medtron Accutron CT; Medtron Injektron 82 CT (ELS); Medtron Injektron 82 HP; Medtron Accutron HP-D\*.

**Modo de Uso:** Com meios assépticos, abrir a embalagem e manusear o material adequadamente, para minimizar o risco de contaminação.

**Instalação da seringa:** Certifique-se de que o pistão esteja completamente retraído. Conecte a seringa na injetora, gire 1/4 de volta, no sentido horário até ouvir um clique.

**Preenchimento da Seringa:** Avance o êmbolo para cima. Remova a tampa e anexe um dispositivo de enchimento. Aspire o meio de contraste para dentro da seringa. Retire o ar completamente. **Remoção da seringa:** gire a seringa 1/4 de volta no sentido anti-horário e remova-a.

**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contra indicação. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado. Não utilizar, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolização de ar ou transmissão de volume inadequado.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica; para materiais potencialmente contaminados.

**Precauções:** Não utilize após o prazo de validade.

**Apresentação:** Seringa de 200ml; um tubo em J de enchimento rápido.

Fabricado por: Shenzhen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltda. Building 11, LishanIndustrial Park, Xinghai Ave. Nanshan District518052, Shenzhen. P.R. China. Distribuidor no exterior: Shenzhen Ant Medical Devices Co. Ltd. 21A Zhenbao Block, HaihuiBldg, Nanyou Ave, 518054, Shenzhen P.R. China.

Importado e distribuído por: Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC: (21) 2435-9335. Resp. Técnica: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro - CRF-RJ nº 15386. Registro Anvisa: 80137010090**

\*Medtron Accutron CT; Medtron Injektron 82 CT (ELS); Medtron Injektron 82 HP; Medtron Accutron HP-D são marcas registradas Medtron.