

Produto de Uso Único – Esterilizada por Óxido de Etileno

MODELO 300103B**Material:** SERINGA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE SHENZHEN**Descrição:** Seringa de 65mL em PVC atóxico, e livre de látex. Produto estéril e apirógeno.**Indicação:** Compatível com injetoras de contraste: Medtron MRI ELS***Modo de Uso:** Com meios assépticos, abrir a embalagem e manusear o material adequadamente, para minimizar o risco de contaminação.**Instalação da seringa:** Certifique-se de que o pistão esteja completamente retraído. Conecte a seringa na injetora, adequadamente.**Preenchimento da Seringa:** Avance o êmbolo para cima. Remova a tampa e anexe um dispositivo de enchimento. Aspire o meio de contraste para dentro da seringa. Retire o ar completamente.**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado. Não utilizar, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolização de ar ou transmissão de volume inadequado.**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade.**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica; para materiais potencialmente contaminados.**Precauções:** Não utilize após o prazo de validade.**Apresentação:** Seringa de 65mL

Fabricado por: Shenzhen Ant Hi-Tech Industrial Co., Ltda. Building 11, Lishan Industrial Park, Xinghai Ave. Nanshan District 518052, Shenzhen. P.R. China. Distribuidor no exterior: Shenzhen Ant Medical Devices Co. Ltd. 21A Zhenbao Block, Haihui Bldg, Nanyou Ave, 518054, Shenzhen P.R. China.

Importado e distribuído por: Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC: (21) 2435-9335. Resp. Técnica: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro - CRF-RJ nº 15386.**

*Medtron ELS é uma marca registrada Medtron.