


Descritivo Técnico – Alko Bag

Bolsa Plástica Para Clister-Opaco-Enema

Produto de Uso Único – Descartável – Destruir Após o Uso

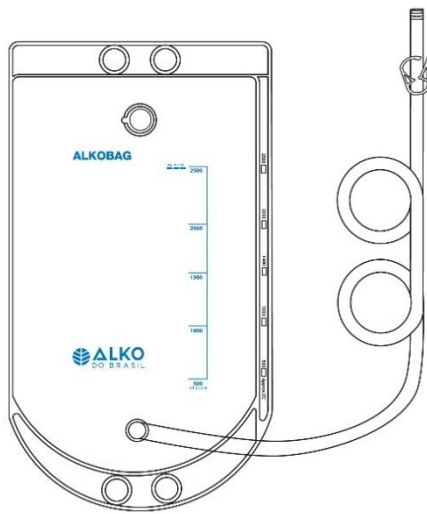

Descrição: Bolsa plástica com capacidade de até 2500mL para o preparo de suspensão de Sulfato de Bário utilizada nos procedimentos de CLISTER-OPACO-ENEMA. A bolsa plástica é fabricada em PVC atóxico, e serve de recipiente para a suspensão de Sulfato de Bário. Numa das extremidades é soldado um sistema de tampa por pressão. Na outra, um tubo de PVC atóxico de aproximadamente 150 cm onde é colocado um *clamp* para o fechamento do tubo. Na outra extremidade deste tubo acopla-se uma cânula retal para a execução do procedimento.

Indicação: Indicada como recipiente para suspensão de sulfato de bário. A finalidade será introduzir, com o auxílio de uma cânula retal, a suspensão no intestino do paciente.

Modo de Uso: Retire a bolsa da embalagem e certifique-se de que o *clamp* do tubo de saída está corretamente fechado. Agitar fortemente a suspensão antes de colocá-la dentro da bolsa plástica. Abrir a tampa da bolsa e introduzir o volume de suspensão de sulfato de bário necessário para a realização do exame. A bolsa deverá estar colocada em um local mais alto em relação ao paciente. Conectar uma cânula retal no tubo de saída, e introduzi-la no reto do paciente. A transferência da suspensão de sulfato de bário se fará por gravidade.

Advertências: A bolsa não deverá ser reutilizada uma vez que durante a execução do procedimento ela poderá entrar em contato com as excreções do paciente.

Armazenamento: Conservar em local seco, e sob temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Precauções: Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Restrições: Não há restrições.

Esclarecimento sobre o uso: O produto deve ser utilizado em conjunto com uma cânula e por profissionais especializados.

Prazo de Validade: O produto tem um prazo de validade indeterminado desde que a embalagem não seja violada.

Transporte: Não existem recomendações especiais para o transporte, desde que sejam resguardadas as condições de armazenagem.

Apresentação: Embalagem primária constituída em saco plástico contendo uma unidade. Embalagem secundária caixa com 12, 24 ou 48 unidades.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricado e distribuído por: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC.: (21) 2435-9335

Resp. Téc.: Dra. Luciana R. A. Carneiro – CRF/RJ 15386

Notificação ANVISA nº: 80137010084