


## Descritivo Técnico

### CÂNULA RETAL SEM BALÃO PARA CLISTER-OPACO-ENEMA

Produto de Uso Único - Proibido Reprocessar

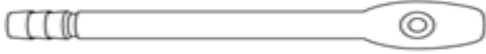

**Descrição:** Cânula retal é um tubo de PVC atóxico, utilizada nos procedimentos de Clister-Opaco Enema. Foi desenvolvida para introduzir no reto do paciente de forma higiênica e segura, a quantidade de sulfato de bário necessária para a realização do exame.

**Indicação:** Indicada nos procedimentos de clister-opaco-enema. A finalidade será de introduzir através do reto a suspensão de sulfato de bário no intestino do paciente.

**Modo de Uso:** Retire a cânula da embalagem e conecte-a na bolsa. Coloque o paciente deitado, em posição lateral e, introduza cuidadosamente a cânula retal no ânus fazendo com que por gravidade o sulfato de bário que está na bolsa seja introduzido no intestino. Após o término do exame deve-se retirar a cânula cuidadosamente e descartá-la.

**Precauções:** Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

**Restrições:** O produto não tem nenhuma indicação terapêutica. É de uso profissional, sendo utilizado apenas na execução do procedimento recomendado. Não há restrições.

**Advertências:** A cânula não deverá ser reutilizada uma vez que durante a execução do procedimento ela poderá entrar em contato com excreções do paciente.

**Cuidados Especiais:** Não existem cuidados especiais.

**Esclarecimento sobre o uso:** O produto deve ser utilizado em conjunto com uma bolsa e por profissionais especializados.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

**Apresentações:** Adulto

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricado e Distribuído por: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ.

CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC.: (21) 2435-9335.

Resp. Téc.: Dra. Luciana R. A. Carneiro – CRF/RJ 15386.

Notificação ANVISA nº: 80137010085