

### Descritivo Técnico – TRANSFER-SET perfurador com câmara de gotejamento

Produto de Uso Único – Proibido Reprocessar – Esterilizado por Óxido de Etileno



**Descrição:** Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, em PVC atóxico flexível, DEHP, com válvula antirrefluxo em T, perfurador com câmara de gotejamento em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

**Indicação:** Para injeção de meios de contraste.

**Modo de Uso:** Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar a parte que contém o perfurador no frasco do meio de contraste e/ou soro fisiológico, a ser aspirado para a seringa, de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contraindicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com o medicamento em nenhum momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

**Precauções:** Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste; Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada; Não utilize após o prazo de validade.

**Apresentação:** Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, com 120cm de comprimento.

- uma via perfurador com câmara de gotejamento;

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335

ANVISA nº: 80137010077