

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Produto de Uso Único – Esterilizada por Óxido de Etileno

### MODELO 200205



**Material:** SERINGA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE SHENZHEN.

**Descrição:** Uma seringa de 200 mL em PVC atóxico e livre de látex.

**Indicação:** Se destina a ser usada na injeção de meios de contraste. Este dispositivo é indicado para utilização única em Injetoras. Compatível com injetoras de contraste: Optivantage - Multiúso\*.

**Modo de Uso:** Com meios assépticos abrir a embalagem e manusear o material adequadamente para minimizar o risco de contaminação.

**Instalação da seringa:** Certifique-se da posição adequada do pistão. Conecte a seringa na injetora, gire 1/4 de volta no sentido horário.

**Cuidados e Advertências:** Não interage com o medicamento em nenhum momento. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado. Não utilizar, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolização de ar ou transmissão de volume inadequado.

**Contraindicação:** Estes dispositivos não são destinados ao uso múltiplo, de infusão de fármaco, quimioterápicos; ou qualquer outro uso para o qual, o dispositivo não esteja indicado.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade.

**Descarte:** O produto deve ser descartado em recipiente apropriado como lixo hospitalar.

**Precauções:** Não utilize após o prazo de validade. Podem ocorrer danos aos componentes se não forem instalados corretamente. Assegurar se todas as conexões estão seguras, não apertar demais. Isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão, e danos aos componentes. Consulte o manual de operação da injetora para mais instruções.

**Apresentação:** Uma Seringa de 200mL.

Fabricado por: Shenzhen Antmed Co., Ltd. 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen 518122, China. Importado e distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC: (21) 2435-9335. Resp. Técnica: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro - CRF-RJ nº 15386. Registro Anvisa: 80137010095.**

\*Optivantage – Multiúso é uma marca comercial da Guerbet.