

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Produto de Uso Único – Esterilizada por Óxido de Etileno

MODELO 300106



Material: SERINGA PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE SHENZHEN.

Descrição: Duas seringas de 200 mL em PVC atóxico e livre de látex. Acessórios: Um extensor em Y de 150cm, com válvula antirrefluxo nas duas antenas e dois tubos em J.

Indicação: Se destina a ser usada na injeção de meios de contraste. Este dispositivo é indicado para utilização única em Injetoras. Compatível com injetoras de contraste: Accist Empower CTA*.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem e manusear o material adequadamente para minimizar o risco de contaminação.

Instalação da seringa: Certifique-se da posição adequada do pistão. Conecte a seringa na injetora adequadamente.

Cuidados e Advertências: Não interage com o medicamento em nenhum momento. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado. Não utilizar, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Conectar a seringa corretamente na injetora, isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão e danos aos componentes. Se o acoplamento tiver inadequado, pode causar embolização de ar ou transmissão de volume inadequado.

Contraindicação: Estes dispositivos não são destinados ao uso múltiplo, de infusão de fármaco, quimioterápicos; ou qualquer outro uso para o qual, o dispositivo não esteja indicado.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e livre de umidade.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado como lixo hospitalar.

Precauções: Não utilize após o prazo de validade. Podem ocorrer danos aos componentes se não forem instalados corretamente. Assegurar se todas as conexões estão seguras, não apertar demais. Isso ajudará a minimizar vazamentos, desconexão, e danos aos componentes. Consulte o manual de operação da injetora para mais instruções.

Apresentação: Duas seringas de 200 mL. Acessórios: Um extensor em Y de 150cm, com válvula antirrefluxo nas duas antenas e dois tubos em J.

Fabricado por: Shenzhen Antmed Co., Ltd. 18 Jinhui Ave., Pingshan New District, Shenzhen 518122, China. Importado e distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CNPJ: 32.137.424/0001-99 – SAC: (21) 2435-9335. Resp. Técnica: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro - CRF-RJ nº 15386. Registro Anvisa: 80137010095.**

*Accist Empower CTA é uma marca comercial da Bracco.