


INSTRUÇÕES DE USO

ADAPTADOR Y

Produto de uso único – Proibido reprocessar – Esterilizado por óxido de etileno.

Descrição: Adaptador Y é um dispositivo em policarbonato transparente com três conexões: uma com válvula hemostática interna (*Click*, *Rosca* ou *Push and Pull*); uma conexão macho luer e uma fêmea. Com ou sem conector conectado a uma torneira.

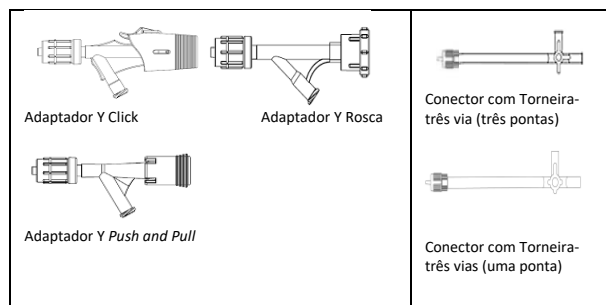

Indicação : Indicado nos procedimentos de angioplastia, tanto angioplastia transluminal percutânea (PTA) quanto angioplastia coronária transluminal percutânea (PTCA). Adaptador: Possui a finalidade de proporcionar um meio para inserir, posicionar e manter fixo na posição fio-guia, cateteres com balão e/ou *stent* no interior do sistema vascular e minimizar o refluxo sanguíneo durante a manipulação de cateteres.

Modo de Uso: Somente em campo estéril e com a vestimenta adequada para procedimentos intervencionistas, abrir a embalagem assepticamente. Abrir a válvula hemostática (*Click*, *Rosca* ou *Push and Pull*) para posicionar o passador-guia e fechá-la para controlar o retorno do sangue. Unir a conexão macho luer do adaptador Y ao cateter guia de angioplastia. Utilizar a conexão fêmea (com ou sem conector com torneira) juntamente com o sistema de injeção de meio de contraste e retirar o ar do sistema.

Cuidados e Advertências: Deve ser utilizado por profissionais especializados nos procedimentos de Angioplastia e com conhecimento das técnicas a serem aplicadas.

Precauções: Não utilize após o prazo de validade. Não usar se a embalagem estiver aberta ou danificada. Certificar-se de que os materiais a serem conduzidos através do Adaptador Y tenham diâmetro inferior ao lúmen interno do produto. Observar as instruções de uso e recomendações de todos os acessórios a serem utilizados no procedimento.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

Armazenamento: Conservar em local ventilado, em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico. Nas formas de apresentação: Adaptador Y Rosca; Adaptador Y Rosca, Conector com Torneira três vias (três pontas); Adaptador Y Rosca, Conector com Torneira três vias (uma ponta); Adaptador Y Click; Adaptador Y *Click*, Conector com Torneira três vias (três pontas); Adaptador Y *Click*, Conector com Torneira três vias (uma ponta); Adaptador Y *Push and Pull*; Adaptador Y *Push and Pull*, Conector com Torneira três vias (três pontas) e Adaptador Y *Push and Pull*, Conector com Torneira três vias (uma ponta).

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335

ANVISA nº: 80137010092