

INSTRUÇÕES DE USO
CÂNULA RETAL SEM BALÃO PARA CLISTER-OPACO-ENEMA
Produto de Uso Único - Proibido Reprocessar



Descrição: Cânula retal é um tubo de PVC atóxico, utilizada nos procedimentos de Clister-Opaco, Enema. Foi desenvolvida para introduzir no intestino do paciente de forma higiênica e segura, a quantidade de sulfato de bário necessária para a realização do exame. A cânula retal poderá ser usada com uma pêra (acessório), fabricada em PVC, para realização do procedimento denominado duplo contraste.

Indicação: A cânula e a pêra (acessório) são indicados nos procedimentos de clister-opaco, enema e duplo contraste. A finalidade será de introduzir através do ânus a suspensão de sulfato de bário e/ou ar no intestino de paciente. Este exame é utilizado em pacientes que precisam investigar alguma possível patologia, a qual não é identificada em outro procedimento.

Modo de Uso: Retire a cânula da embalagem e conecte-a na bolsa; Coloque o paciente deitado, em posição lateral e, introduza cuidadosamente a cânula retal no ânus fazendo com que por gravidade o sulfato de bário que está na bolsa seja introduzido no intestino. Após o término do exame deve-se retirar a cânula cuidadosamente e descartá-la. Para a realização do duplo contraste, ou seja, introdução de ar por meio da pêra é necessário clampar a bolsa e desconectá-la da cânula. Para manusear a pêra e introduzi-la na cânula, é necessário retirar o bico de plástico e encaixar na cânula retal. Após infle o ar da pêra na cânula retal, finalize o procedimento. Descarte todo o material.

Precauções: Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

Restrições: O produto não tem nenhuma indicação terapêutica. É de uso profissional, sendo utilizado apenas na execução do procedimento recomendado. Não há restrições.

Advertências: A cânula e a pêra não deverá ser reutilizada, isso evitará o risco de contaminações cruzadas entre os pacientes; uma vez que, durante a execução do procedimento ela poderá entrar em contato com as excreções do mesmo.

Cuidados Especiais: Não existem cuidados especiais.

Esclarecimento sobre o uso: O produto deve ser utilizado em conjunto com uma bolsa e poderá ser utilizado com uma pêra. Este procedimento deve ser realizado por profissionais especializado.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Apresentações: Adulto e pediátrica.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335
ANVISA nº: 80137010085