

## INSTRUÇÕES DE USO – ANGIO-SET



Produto de uso único – Proibido reprocessar – Esterilizado por óxido de etileno.

**Descrição:** Conector em PVC atóxico, livre de DEHP, livre de Látex, utilizado em procedimentos de hemodinâmica conectados a seringa e outros extensores. Possui conector fêmea, conector macho fixo ou rotatório e tampa protetora. Produto suporta pressão até 1200 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

**Indicação:** Para injeção de meios de contraste.

**Modo de Uso:** Com meios assépticos abrir a embalagem. O conector fêmea deve ser acoplado na seringa da injetora e o macho conectado na via de acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contraindicação. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal e livre de látex. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

**Precauções:** Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste; Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada; Não utilize após o prazo de validade.

**Apresentação:** Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações com conector macho fixo ou rotatório nos tamanhos de 25cm, 50cm, 75cm, 120cm, 150cm e 180cm.

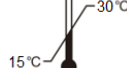
Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335

ANVISA nº: 80137010097

| Símbolos                                                                           | Descrição         | Símbolos                                                                            | Descrição                   | Símbolos                                                                            | Descrição                         | Símbolos                                                                             | Descrição                             | Símbolos                                                                              | Descrição                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Não reesterilizar |  | Consultar instruções de uso |  | Esterilizado com Óxido de Etileno |  | Manter seco                           |  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada |
|  | Livre de DEHP     |  | Livre de látex              |  | Dispositivo médico                |  | Limite de temperatura para transporte |  | Uso único                                      |

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.710-255 – Tel: (21) 2435-9335 – CNPJ: 32.137.424/0001-99 – sac@alkodobrasil.com.br