


INSTRUÇÕES DE USO – MONITOR-SET

Produto de uso único – Proibido reprocessar – Esterilizado por óxido de etileno.

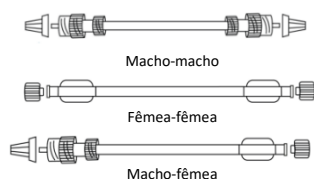

Descrição: Conector para injeção de meio de contraste e soro fisiológico. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal, livre de látex e livre de DEHP. Extensor em PVC atóxico, conector luer lock macho e/ou fêmea. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos abrir a embalagem sem retirar o produto completamente da mesma, para evitar contaminação. Possui conector fêmea para ser conectado na seringa, e a parte que contém o macho será conectado no antebraço na via de acesso ao paciente. Na apresentação macho/macho, um conector poderá ser conectado na seringa, no extensor ou no cateter; e o outro conector poderá ser conectado em outro extensor ou no mesmo manifold.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste; Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada; Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações macho-macho, fêmea-fêmea e macho-fêmea com 100cm, 110cm, 120cm, 130cm, 140cm, 150cm, 160cm, 170cm e 180cm. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça única.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 32137424/0001-99 SAC: 0800 000 9335
ANVISA nº: 80137010077

Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição
	Não reesterilizar		Consultar instruções de uso		Esterilizado com Óxido de Etileno		Manter seco		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Livre de DEHP		Livre de látex		Dispositivo médico		Limite de temperatura para transporte		Uso único