

INSTRUÇÕES DE USO – PATIENT-SET TS

Produto de uso único – Proibido reprocessar – Esterilizado por óxido de etileno.



Descrição: Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal, livre de látex e livre de DEHP. Possui torneira em policarbonato com sistema fechado em silicone e superfície lisa que permite fácil antissepsia, conector macho reversível em PVC atóxico e tampa protetora em polietileno de alta densidade; para conectar ao acesso venoso do paciente, sendo cateteres e outras conexões. Possui uma válvula antirrefluxo em policarbonato com abertura sob pressão. Produto suporta pressão de até 300 PSI.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem. Preencher o conector com contraste ou solução fisiológica esterilizada, até a retirada de todo o ar e mantê-lo com a seringa conectada ou oclisor estéril. Acoplar a torneira (localizado na extremidade inferior da peça, na figura ao lado), firmemente ao cateter periférico do paciente

Deixar a seringa acoplada a válvula dupla antirrefluxo (localizado na extremidade superior da peça, na figura acima), para ocluir o produto ou fechar com um oclisor esterilizado. A torneira proximal ao paciente permite coleta de sangue, antes da realização de exames contrastados. Acoplar a válvula dupla antirrefluxo ao conector da injetora, que infunde diferentes soluções contínuas e/ou intermitentes. A torneira deve ficar livre para conexão de equipos e/ou seringas possibilitando administração de soluções. E deve estar fechada no momento da administração de contraste, para o acesso lateral com a *needle free*. Para liberar a passagem é necessário virá-la, conforme setas indicativas. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado, para que possa manusear o produto adequadamente, mantendo a integridade do mesmo, para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

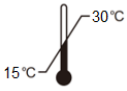
Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico nas apresentações de 10cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 32137424/0001-99 SAC: 0800 000 9335
ANVISA nº: 80137010077

Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição	Símbolos	Descrição
	Não reesterilizar		Consultar instruções de uso		Esterilizado com Óxido de Etileno		Manter seco		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Livre de DEHP		Livre de látex		Dispositivo médico		Limite de temperatura para transporte		Uso único