

## INSTRUÇÕES DE USO

### PUNTOR

Produto de uso único. Proibido reprocessar.

Esterilizado por óxido de etileno.



**Modo de Uso:** Pingar uma gota de cada antígeno a ser testado no antebraço do paciente com 2 cm de distância entre uma e outra. Destacar um estilete do Puntor e, colocando-o na posição vertical fazer uma leve pressão sobre a pele do paciente com um pequeno giro para a direita e para a esquerda. Utilizar um estilete para cada antígeno evitando a contaminação entre os antígenos.

**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com os antígenos em qualquer momento. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados.

**Armazenamento:** Em local seco e temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.

Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335

ANVISA nº: 10304540017