

## INSTRUÇÕES DE USO – TRANSFER-SET DUAS VIAS com perfurador

Produto de uso único – Proibido reprocessar – Esterilizado por óxido de etileno.



**Descrição:** Conector para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada. São fabricados em PVC atóxico, isento de metal, livre de látex e livre de DEHP. Possui válvula antirrefluxo em T, perfurador pequeno ou grande em PVC e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

**Indicação:** Para injeção de meios de contraste.

**Modo de Uso:** Com meios assépticos abrir a embalagem. Acoplar a parte que contém o perfurador no frasco do meio de contraste e/ou soro fisiológico, a ser aspirado para a seringa, de acordo com a necessidade. A outra parte que contém a válvula antirrefluxo em T será conectada na seringa da injetora. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

**Cuidados e Advertências:** O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

**Armazenamento:** Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**Descarte:** Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

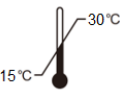
**Precauções:** Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

**Apresentação:** Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico, com 100cm, 110cm, 120cm, 130cm, 140cm e 150cm de comprimento. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

- duas vias com perfurador pequeno ou perfurador grande;

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo.

Fabricante: Alko do Brasil Ind. e Com. Ltda.  
Rua Mapendi, 360 – Rio de Janeiro – RJ  
CNPJ: 32.137.424/0001-99 SAC: 0800 000 9335  
ANVISA nº: 80137010077

| Símbolos                                                                           | Descrição         | Símbolos                                                                            | Descrição                   | Símbolos                                                                            | Descrição                         | Símbolos                                                                             | Descrição                             | Símbolos                                                                              | Descrição                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Não reesterilizar |  | Consultar instruções de uso |  | Esterilizado com Óxido de Etileno |  | Manter seco                           |  | Não utilizar se a embalagem estiver danificada |
|  | Livre de DEHP     |  | Livre de látex              |  | Dispositivo médico                |  | Limite de temperatura para transporte |  | Uso único                                      |